


## qLabs ElectroMeter instellen


Plaats de batterijen op de juiste manier in het meetapparaat. Het meetapparaat zal nu automatisch aan gaan.

### Werking knoppen en scherm.

Op het meetapparaat vindt u vier knoppen. De functies van de knoppen komen overeen met de opties in het scherm.

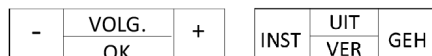


Het meetapparaat kan verschillende schermen tonen bij de eerste keer aanzetten. Ga hieronder naar het scherm welke u ziet en ga vanaf daar verder.

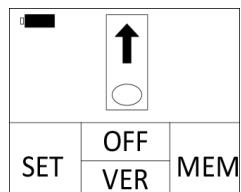

1. Druk op SET, ga met de rechter knop naar LANGUAGE, druk op OK, selecteer NEDERLANDS met de rechter knop en druk op OK. Druk vervolgens eenmaal op de aan-/uit knop. Ga verder met stap 3.



2. Ga met de rechter knop naar LANGUAGE, druk op OK, selecteer NEDERLANDS met de rechter knop en druk op OK. Druk vervolgens eenmaal op de aan-/uit knop. Ga verder met stap 3.

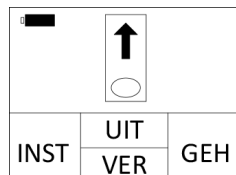

3. Druk op INST om het menu te openen, ga verder met stap 4.




4. Druk op OK om de datum en tijd in te stellen en ga naar de volgende stap.

## qLabs ElectroMeter instellen




5. De datumindeling is dag-maand-jaar. Het jaartal is geselecteerd. Gebruik de - en + om de getallen te wijzigen. Druk op VOLG. om naar de volgende te gaan. Wijzig de maand, dag, uren en minuten via dezelfde methode. Wanneer datum en tijd correct zijn ingesteld drukt u op OK.


U keert terug in het hoofdmenu, druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.

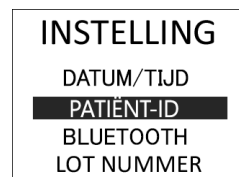

6. PATIËNT-ID wordt niet gebruikt. Druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.

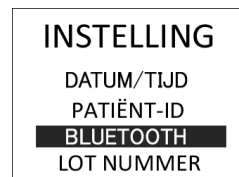


7. BLUETOOTH wordt op dit moment niet ondersteund. Druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.

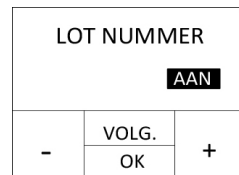


8. Druk op OK om LOT NUMMER in te stellen. Gebruik de - of de + om AAN te selecteren. Druk op OK wanneer AAN is geselecteerd.

U keert terug in het hoofdmenu, druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.

## qLabs ElectroMeter instellen

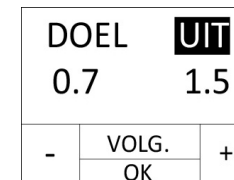

9. Druk op OK om DOEL te openen. Gebruik de - of + om UIT te selecteren. Druk op OK wanneer UIT is geselecteerd. U keert terug in het hoofdmenu, druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.

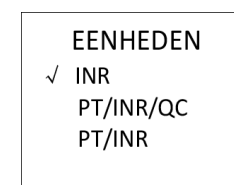


10. Druk op OK om EENHEDEN te openen. Druk op de rechter knop om INR te selecteren. Druk op OK wanneer INR is geselecteerd. U keert terug in het hoofdmenu, druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.



11. Druk op OK om ACHTERGR VERL (achtergrond verlichting) te openen. Druk op de rechter knop om AAN te selecteren. Druk op OK wanneer AAN is geselecteerd. U keert terug in het hoofdmenu, druk op de rechter knop en ga naar de volgende stap.



12. Druk op OK om TAAL te openen. Hier kunt u de taal wijzigen maar de taal is reeds ingesteld op NEDERLANDS. Druk tweemaal op de aan-/uit knop om naar het begin-scherm te gaan.

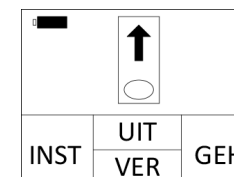

13. U bent nu klaar met het instellen van het meetapparaat. Druk tweemaal op de uit knop om het meetapparaat uit te schakelen.